

• Ziehen Sie das Netzkabel heraus, das längere Zeit nicht verwendet werden soll. Wenn Sie das Kabel längere Zeit angeschlossen lassen, kann dies zu einem Brand führen.

(DE)

- Das Gerät darf nur von einem Bediener des Geräts verwendet werden. Es besteht die Gefahr eines Unfalls oder einer Fehlfunktion des Geräts.
- Es kann zu Problemen bei der Batterieleistung kommen, wenn das Handstück nach 1 Monat Batterielade nicht aufgeladen wird.

PRODUKTGARANTIE

MISSMITO Speed garantiert Produkte nach dem Kauf wie folgt. Eine Reparatur ist grundsätzlich an einem fehlerhaften Produkt durchzuführen. Wenn die Maschine wegen Unachtsamkeit des Benutzers defekt ist, ist die Reparatur dem Kunden belastet.

MISSMITO Speed garantiert Produkte für 1 Jahr ab Kaufdatum. Wenn das Gerät innerhalb des Garantiejahres bei ordnungsgemäßer Verwendung außer Betrieb ist, bieten wir kostenlose Reparaturen an. (Wenn es sich jedoch um Sendungen nach Übersee handelt, zahlt der Kunde die Hälfte. Beispielsweise zahlt der Kunde die Versandkosten nach Korea und EVIE die Versandkosten nach Übersee).

Die 1 Jahr kostenlose Garantie gilt jedoch auch während der Garantiezeit nicht für die folgenden Fälle.

- 1) Probleme aufgrund von Fahrlässigkeit des Benutzers oder wenn die willkürliche Reparatur des Benutzers das Produkt verändert oder beschädigt hat.
- 2) Wenn das Produkt durch Reparaturen an anderen Orten als dem vom Unternehmen benannten Stellen oder Servicezentren modifiziert oder beschädigt wurde.
- 3) Wenn das Produkt ein Problem hat oder durch einen Schock während einer Übertragung beschädigt wird.
- 4) Wenn das Produkt außer Betrieb ist, wegen verwendeten Komponenten, die nicht vom Unternehmen bestimmt wurden.
- 5) Wenn der Adapter außer Betrieb ist (Normalerweise ist der Adapter leicht abzuschreiben, wenn der Kunde ihn verwendet, es handelt sich also um ein Verbrauchsprodukt).

LAGERUNG UND INSPEKTION

1) Allgemeines Produktmanagement

- Schalten Sie das Gerät aus, während das Gerät nicht verwendet wird. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab und halten Sie das Gerät sauber.
- Lassen Sie das Gerät weder direktem Sonnenlicht ausgesetzt noch an einem Ort mit schneller Temperaturänderung, hoher Hitze oder Luftfeuchtigkeit.
- Eine Reparatur durch einen Laien oder ein Austausch von Bauteilen ist verboten.
- Schlagen Sie nicht auf das Gerät ein und schütteln Sie es nicht.
- Der häufigste Fall von Außerbetriebnahme ist eher ein Adapter als ein Handstück. Dies liegt daran, dass beim Aufbewahren die meisten Kunden das elektrische Kabel rollen und aufbewahren. Wenn Sie den elektrischen Draht rollen, ist die innere Leitung leicht zu brechen.

2) Regelmäßige Überprüfung

- Überprüfen Sie das Gerät und den Adapter vor dem Gebrauch.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Stabilität des Geräts und ob es gemäß Handbuch korrekt funktioniert oder nicht, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde.

GARANZIA DEL PRODOTTO

(IT)

Per applicare la riparazione in garanzia MISSMITO Speed, è necessario osservare quanto segue condizioni. Un prodotto danneggiato e non funzionante verrà riparato se non vi è alcun guasto del dispositivo a causa di incuria dell'utente, la riparazione viene solitamente addebitata al cliente. La garanzia copre i prodotti di cui sopra. Per reclami sui prodotti, contattare il proprio distributore o rivenditore.

Il periodo di garanzia per MISSMITO SPEED è valido per 1 anno dalla data di acquisto. Se il dispositivo fuori servizio durante l'anno di garanzia e la prova del corretto utilizzo, offriamo riparazione o sostituzione gratuita delle apparecchiature. La garanzia gratuita di un anno non si applica a i seguenti casi:

- 1) Problemi con il prodotto dovuti a negligenza o danni dell'utente user prodotto a causa di riparazioni arbitrarie da parte dell'utente.
- 2) Se il prodotto è stato danneggiato dalla riparazione in luoghi diversi dai centri di assistenza società designate.
- 3) Se il prodotto è danneggiato da un urto.
- 4) Se il prodotto è fuori servizio a causa dell'utilizzo di componenti non specificati aziende.
- 5) Quando l'adattatore è fuori servizio (se l'adattatore è stato utilizzato per alimentare altri dispositivo)

STOCCAGGIO E ISPEZIONE

1) Regole generali per l'utilizzo del prodotto


- Spegner il dispositivo quando non è in uso.
- Pulire la superficie con un panno asciutto e mantenere pulito il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole né conservarlo in luoghi dove la temperatura cambia rapidamente o con calore o umidità costantemente elevati.
- Sono vietate le riparazioni o la sostituzione di parti da parte di una persona diversa dalla persona designata.
- Non sottoporre il dispositivo a urti o scuoterlo.
- Un caso comune di malfunzionamento è un adattatore danneggiato piuttosto che un manipolo. È perché quando lo riponi, la maggior parte dei clienti avvolge il cavo in una palla e lo conserva. Se avvolgi il filo elettrico, la linea interna si rompe facilmente.

2) Ispezione regolare

- Controllare sempre il dispositivo e l'adattatore prima dell'uso.
- Prima dell'uso, verificare la stabilità del dispositivo e se funziona correttamente secondo il manuale, soprattutto se non è stato utilizzato per molto tempo.

MISSMITO SPEED

Benutzerhandbuch / Manuale d'uso

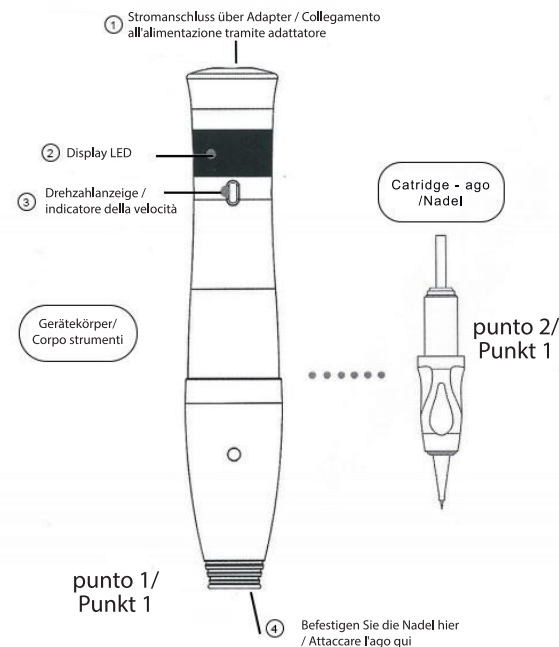

EMPFOHLENE VERWENDUNG

(DE)

- Anwendung
- 1) Schließen Sie den DC-Adapter an die Stromversorgung an
- 2) Schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Adapter an
- 3) Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Handstücks an. (wie auf den Fotos unten gezeigt)

USO CONSIGLIATO

(IT)

- Impostazioni
- 1) Collegare l'adattatore CC all'alimentatore
- 2) Collegare il cavo USB all'adattatore DC
- 3) Collegare il cavo USB alla parte inferiore del manipolo. (vedi Figura 1)

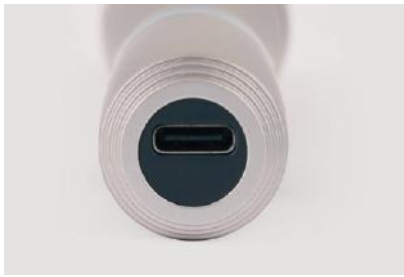


Abbildung 1 / Immagine 1

• Vorbereitung

- 1) Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie eine Nadelpatrone heraus.
- 2) Passen Sie den Punkt 1 des Handstücks an den Punkt 2 der Nadel.
- 3) Drehen Sie die Nadel im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
- 4) Passen Sie die Länge der Nadel an.
- 5) Zum Entfernen der Nadelpatrone die Nadel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 6) Verwenden Sie das Gerät nach dem Vorwärmen. (Geschwindigkeit von 1 bis 8).

• Einstellung der Geschwindigkeit und Nadellänge

1) Geschwindigkeitsregelung und Ein/Aus

Stromversorgung (Ein/Aus)

- Wenn der DC-Adapter an die Rückseite des Handstücks angeschlossen ist (siehe Abbildung 1), blinkt die Nummer im LED-Anzeigefenster und zeigt damit an, dass die Stromversorgung im Standby-Modus ist. Drücken Sie die Taste oben, um den Betrieb zu starten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Gerät in der Startgeschwindigkeit. Wenn Sie den Vorgang beenden möchten, halten Sie die Taste für 2 oder 3 Sekunden gedrückt.

Geschwindigkeitsregelung

- Wenn Sie die Geschwindigkeit anpassen möchten, können Sie mit der Taste von Stufe 1 zu Stufe 9 wechseln. Die Stufen werden in Zahlen auf der LED-Anzeige angezeigt, sodass Sie die gewünschte Geschwindigkeit auswählen und sie auf der Anzeige überprüfen können. Wenn Sie das Gerät nach einer Pause während des Betriebs neu starten möchten, beginnt die Geschwindigkeit mit der letzten Einstellung (nur wenn die Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist). Normalerweise wird die Geschwindigkeit der Maschine auf 6 bis 8 eingestellt.

Einstellung der Nadellänge

- Drehen Sie den unteren Teil (Unterseite) des Handstücks, um die Nadellänge einzustellen.

Bei Geschwindigkeitsrückgängen während des Gebrauchs

- Wenn das Handstück ausgeschaltet ist oder während des Betriebs nicht mehr funktioniert, bedeutet dies, dass die Maschine entladen ist. Laden Sie es daher bitte mit dem USB-Anschluss und Adapter auf. (Siehe (1) Stromversorgung (Ein / Aus)).

ZUSAMMENSETZUNG DES MISSMITO SPEED

- 1) Handstück
- 2) USB C-KABEL
- 3) Gleichstromadapter
- 4) MTS-Patrone
- 5) Donut-förmige Wiege

(DE)

• Preparazione

- 1) Rimuovere l'imballaggio e rimuovere la cartuccia.
- 2) Allineare il punto 1 al corpo del dispositivo con il punto 2 della cartuccia, quindi inserirla nel manico.
- 3) Ruotare la cartuccia con l'ago in senso orario per fissarla.
- 4) Regolare la lunghezza dell'ago - ruotando la parte superiore del corpo del dispositivo.
- 5) Per rimuovere la cartuccia, ruotarla in senso antiorario.
- 6) Accendere l'apparecchio e lasciarlo inattivo per un po' per riscaldarsi. (Scegliere velocità da 1 a 8 - si consiglia la massima 8).

• Impostare la velocità degli aghi.

1) Controllo velocità e On/Off

Alimentazione (accesso / spento)

- Se l'adattatore di ricarica è collegato al corpo dell'unità al connettore USB C (così com'è mostrato in figura 1), Miss Mito è in carica. Dopo aver segnalato lo strumento è carico scollegare il cavo. Premere il pulsante sul corpo del dispositivo e selezionare la velocità per avviare l'operazione. A questo punto viene impostata la velocità iniziale. Per interrompere l'operazione, tenere premuto pulsante premuto per 2 o 3 secondi.

Controllo della velocità

- Per regolare la velocità, utilizzare il pulsante per regolare dal livello 1 al livello 8. A questo punto, la velocità apparirà nelle immagini sul display a LED, quindi è possibile selezionare la velocità desiderata e verificare i dati visualizzati sul display.

Regolazione della lunghezza dell'ago

- Regolare la lunghezza dell'ago desiderata ruotando la parte superiore del corpo del dispositivo.

- Se il manico è spento o smette di funzionare durante l'uso, significa che la macchina è scarica. Usalo di nuovo dopo averlo caricato con l'adattatore USB C. (Vedi (1) Accensione (accensione/spagnimento)).

CONTENUTO DEL PACCHETTO MISSMITO SPEED

- 1) Corpo del dispositivo
- 2) Cavo USB C
- 3) Adattatore CC
- 4) Cartuccia MTS - ago
- 5) Scambia la ciambella

(IT)



VORSICHTSMAßNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

(DE)

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt das Handbuch, um sich über die korrekte Verwendung des Geräts zu informieren.

• Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

1) Wenn die Nadel übermäßig stark belastet werden, kann das Gerät möglicherweise nicht in Betrieb genommen werden. Ersetzen Sie in diesem Fall die Nadel oder entfernen Sie die überschüssige Kraft von der Nadel, bevor Sie sie wieder aufnehmen.

2) Wenn der Adapter nicht der Spezifikation entspricht, können die Innenteile des Handstücks beschädigt werden. Wenn der im Paket für das Gerät enthaltene Adapter ausfällt, wenden Sie sich zur Reparatur an das Geschäft oder das Servicecenter.

• Das Gerät darf im folgenden Fall nicht verwendet werden:

- 1) Personen mit einer chronischen Krankheit oder solche, deren Symptome sich bei 38°C oder mehr verschlimmern.
- 2) Patienten mit unregelmäßigem Blutdruck, einer ansteckenden Krankheit oder einer tuberkulösen Krankheit.
- 3) Patienten mit bösartigem Tumor oder schwangeren Frauen.
- 4) Patienten mit einer Allergie oder Hämophilie.
- 5) Personen, die lange Zeit Steroid eingenommen haben oder anfällig für Kapillarektasien sind, weil sie eine abnormale Leberfunktion haben.
- 6) Patienten mit Melanose im Gesicht oder Patienten mit hoher Körpertemperatur oder Patienten, die regelmäßig medizinisch behandelt werden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Spannung über 220 V AC - Dies kann zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion des Geräts führen.

• Reparieren, zerlegen oder wechseln Sie das Gerät nicht willkürlich.

• Berühren Sie das Gerät nicht und ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nasser Hand heraus. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.

• Ziehen Sie das Kabel nicht ab oder biegen Sie es nicht. Dies kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen (Kabel mit einem Problem muss durch ein vollständiges Produkt ersetzt werden).

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

(IT)

Leggere il manuale prima dell'uso per essere pienamente consapevoli dell'uso corretto dispositivo.

• Precauzioni durante il funzionamento

1) Se viene applicata una pressione eccessiva all'ago, la macchina potrebbe non avviarsi. Se è un agodegradato dalla pressione, sostituirlo.

2) Se l'adattatore non viene utilizzato secondo le istruzioni, le parti interne potrebbero danneggiarsi manipolo. Se l'adattatore fornito con il dispositivo non funziona, contattare distributore.

• Lo strumento Miss Mito non deve essere utilizzato su persone:

- 1) Persone con una malattia cronica o persone con febbre pari o superiore a 37°C.
- 2) Persone con pressione alta, malattie infettive o tubercolosi malattia.
- 3) Persone con cancro o donne in gravidanza.
- 4) Persone con allergie o emofilia.
- 5) Le persone che assumono steroidi per lungo tempo o sono a rischio di capillarectasia a causa di funzionalità epatica anormale.
- 6) Persone con vene varicose o rosacea.

• Non utilizzare dispositivi con una tensione superiore a 220 V CA - Ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o guasti alle apparecchiature.

• Non riparare o smontare il dispositivo da soli. Ciò può danneggiare il dispositivo.

• Non toccare il dispositivo né scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Ciò può danneggiare il dispositivo.

• Non sbucciare o piegare in alcun modo il cavo. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

• Scollegare il cavo di alimentazione e l'adattatore quando lo strumento è carico e non è in uso utilizzare per un periodo di tempo più lungo.

• Lasciare il cavo collegato per lungo tempo può provocare un incendio.

• Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone diverse da una persona che lo ha studiato adeguatamente Manuale d'uso.

Esiste il rischio di incidente o malfunzionamento del dispositivo.

• Se il dispositivo non si carica dopo aver scaricato la batteria entro 1 mese, potrebbe esserci un problema con carica batteria.